

S

7N/RUGS/CODE/644
PE 2050
out / 2002
set / 2007

LOTE:
FAB:
VAL:

Produto de uso único.
Ler as instruções de uso. Não fracionar.
Proteja este produto do calor, umidade e da luz.
Composição: látex de borracha natural.
Lubrificante: óleo de silicone sem espermicida.

HORA H preservativos

Contém 3 preservativos masculinos
Largura nominal: 52 mm

Liso, transparente,
lubrificado, com
reservatório



"O selo de qualidade DUREX é um símbolo internacional de compromisso com a qualidade de camisinhas. Este foi ganho pelo HORA H porque passou por rigorosos testes de qualidade em todas as etapas de sua fabricação."



HORA H preservativos

Fabricado por SSL International plc
TTK-LIG Ltd
6 Cathedral Road, Chennai 600 086, India
Importado por
John Snow Brasil Consultoria Ltda.
SRTN Q. 701 Conj. C nº 124 Sala 314-A Brasília-DF
Tel: (61) 328-1278
Resp. Técnico: Mônica E. Carvalho CRF-DF 1649
Reg. MS: 10382000002

PAPO 10 SOBRE CAMISINHA

É necessário que você use camisinha para não ficar vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis.

A lubrificação do homem durante a transa pode conter esperma e por isso pode transmitir doenças e também engravidar. A lubrificação da mulher também pode trazer doenças, portanto é importante que você use camisinha.




- Antes de abrir o envelope, preste atenção na data de validade para confirmar que a camisinha não está vencida, e no selo do INMETRO, que significa que ela foi aprovada.
- Abra o envelope somente na hora do uso, rasgando a embalagem pelo canto.
- Não abra a embalagem com os dentes, unhas ou objetos pontiagudos.



- Coloque a camisinha quando seu pênis já estiver duro, antes de qualquer contato genital ou penetração.
- Aperte a ponta da camisinha para ela não ficar cheia de ar, senão ela pode rasgar ou estourar.
- Coloque a camisinha do lado certo, se ela não estiver do lado certo, não vai desenrolar.



- Apertando a ponta, desenrole a camisinha até a base do pênis.
- A camisinha já é lubrificada, mas se você precisar de mais, só use lubrificantes à base de água. Não use vaselina ou outro lubrificante à base de óleo.

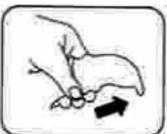

- Depois de gozar, retire a camisinha com o pênis ainda duro e tenha cuidado para ela não enrolar nos pêlos e para o esperma não vazar.
- Depois de retirar a camisinha, não deixe seu pênis entrar em contato com o corpo da pessoa com quem você está.



- Não jogue a camisinha no vaso sanitário, porque ele pode entupir. Jogue a camisinha no lixo!

LEMBRE SEMPRE

- Nunca use uma camisinha mais de uma vez.
- Sempre leve uma camisinha nova no bolso.
 - Não deixe a camisinha muito tempo na carteira porque pode estragar.
 - Se a camisinha irritar a sua pele, procure um médico.
- Use só uma camisinha de cada vez.

Este produto foi desenvolvido com o grupo "De Jovem para Jovem" e o Instituto PROMUNDO (www.promundo.org.br).

Nenhum método anticoncepcional garante que você está 100% protegido, mas usando a camisinha corretamente, você vai diminuir muito as chances de engravidar sua parceira e os riscos de contrair AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis.